

# RebiSmart™



## Instrukcijų vadovas



- RebiSmart™ yra elektroninis automatinis injektorius, kuris automatiškai sušvirkščia iš anksto nustatytą Rebif® (interferono beta-1a), skirtą išsėtinės sklerozės gydymui, dozę. Šį prietaisą gali naudoti tik vienas asmuo.
- RebiSmart™ turi būti naudojamas griežtai pagal vadovo instrukcijas ir tik po tinkamo apmokymo.
- RebiSmart™ naudojamas išskirtinai vien tiksliai su Rebif® užtaisais, pagal paskyrimą. Išsami informacija apie Rebif® skyrimą pateikiama vaisto pakuotės lapelyje. RebiSmart™ nesaugu naudoti su kitais užtaisais.
- Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu dėl vaisto dozės, kad ji atitiktų paskirtąją dozę.
- Rekomenduojamos prietaiso RebiSmart™, kuriame yra Rebif® užtaisas, laikymo sąlygos įvairiose šalyse gali būti skirtingos. Jį galima laikyti šaldytuve ar ne šaldytuve, dėl jūsų šalyje taikomų laikymo sąlygų prašome pasitarti su savo sveikatos priežiūros specialistu.
- Nelaikykite Rebif® šaldiklyje ar netoli jo. **Nešvirkškite Rebif®, jei žinote arba įtariate, kad jis buvo užšaldytas.**
- RebiSmart™ naudojamas tik su vienkartinėmis, steriliomis Serofine™ 0,33 × 12 mm (29G × 1/2") arba 0,30 × 8 mm (30G × 5/16") adatomis. Adatas laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Adatas saugiai išmeskite, laikydamiesi vietinių taisyklių. RebiSmart™ nesaugu naudoti su kitomis adatomis.

- Kad Rebi® lašeliai nepatektų ant prietaiso RebiSmart™, atlikdami injekciją, jį laikykite pasukę statmenai aukštyn.
- RebiSmart™ yra tikslus prietaisas ir su juo reikia elgtis atsargiai. Nenaudokite prietaiso, jei jis neveikia tinkamai ir nemėginkite jį pataisyti. Nenaudokite prietaiso RebiSmart™ netoli kitų elektroninių prietaisų.
- RebiSmart™ sudėtyje nėra kenksmingų ar toksinių komponentų. Jį galima naudoti 3 metus, skaičiuojant nuo pirmo panaudojimo, vėliau jį pakeičia vietiniai tiekėjai. Prietaise RebiSmart™ nesaugoma jokia asmeninė informacija, todėl jokių saugumo ar asmens apsaugos problemų nėra.
- Jei prietaisas RebiSmart™ nukrito, patikrinkite, ar nesimato sulūžusių dalių. Jjunkite RebiSmart™ ir patikrinkite, ar nėra įspėjimo pranešimo „Prietaiso klaida“. Išimkite užtaisą, naudodami pagrindinio meniu nuostatą „Išimti užtaisą“. Atidžiai patikrinkite, ar nėra įtrūkimų ir išmeskite, jei yra kokių nors pakenkimo požymių.
- Patekus skysčio ant prietaiso RebiSmart™, jį reikia nuvalyti švariu, sausu audiniu ir patikrinti, ar nėra pranešimų apie klaidas, kaip aprašyta aukščiau.

**Injekcijos mygtukas**

**Užtaiso jėigos mygtukas**

**Užtaiso jėiga**

**Adatos atleidimo mygtukas**



**Informacijos ekranas**

**Pasirinkimo mygtukai**

**Adatos ertmė**

**Infraraudonųjų  
spindulių jungtis**

**Odos jutiklis**

**Baterijų dangtelis**






Paspauskite ir laikykite mygtuką „Įjungta“, kol pasirodys pasisveikinimo ekranas.


Po kelių sekundžių vietoj pasisveikinimo ekrano pasirodys informacijos ekranas, kuriame bus pateikiama išsami informacija apie paskutinę injekciją.

Pradėdami injekcijos procedūrą, spauskite „Prad.“

# 1 VEIKSMAS Adatos įstatymas

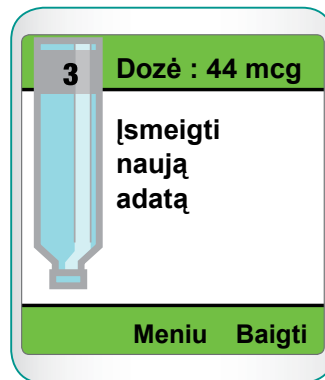

Paimkite naują adatą ir nuimkite sterilią apsaugą.

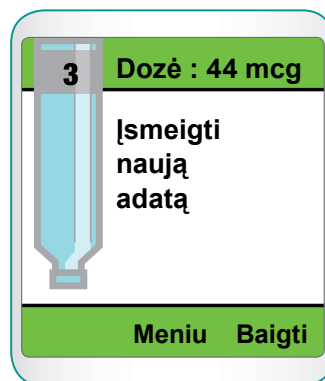

Į adatos ertmę įstatykite adatos dangtelį.

RebiSmart™ pypteli vieną kartą.


Kai adata įsistato, RebiSmart™ pypteli du kartus.



Išimkite adatos dangtelį, paspausdami jį į šalis.


**Svarbu: saugokite dangtelį, kad galėtumėte nuimti adatą po injekcijos.**

## 2 VEIKSMAS Injekcijos atlikimas

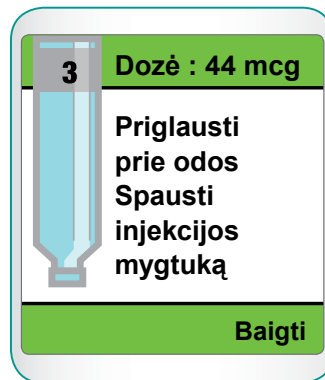


Laikykite RebiSmart™ vertikaliai odos atžvilgiu.

RebiSmart™ pypteli vieną kartą.

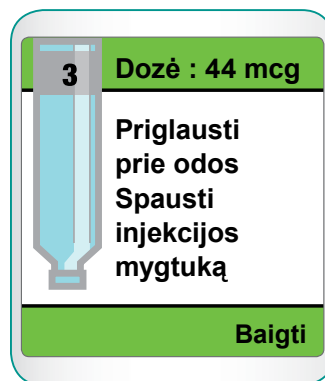


Pradeda šviesti žalia injekcijos mygtuko šviesa.

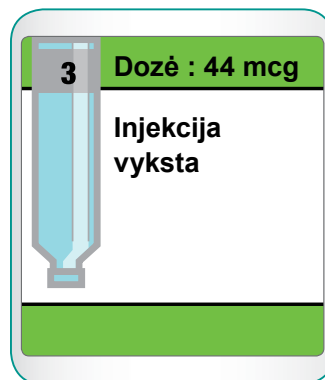

Paspauskite injekcijos mygtuką, pradėkite injekciją.

Mirkčioja žalia injekcijos mygtuko šviesa ir jūsų RebiSmart™ pypteli du kartus.

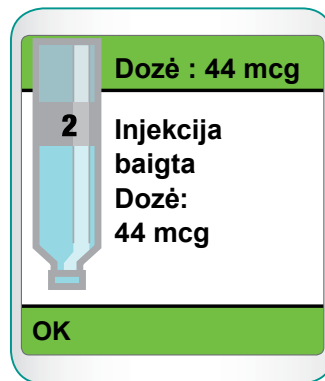


Kai žalia injekcijos šviesa išsijungia, injekcija yra baigta.

Dabar galima nuimti RebiSmart™.



Jei norite tęsti, paspauskite „OK“.

### 3 VEIKSMAS Adatos nuėmimas

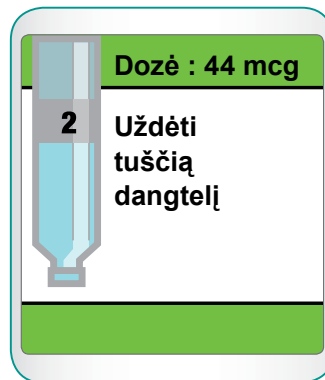

Istumkite tuščią adatos dangtelį į adatos ertmę.


RebiSmart™ pypteli vieną kartą.

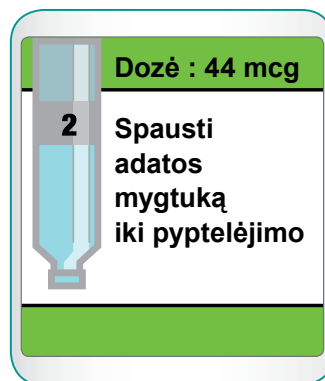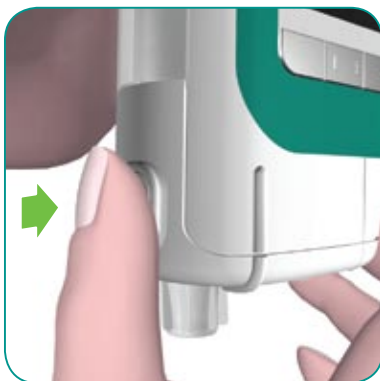

Paspauskite ir laikykite adatos atleidimo mygtuką, kol RebiSmart™ pyptels du kartus.



Paspauskite adatos dangtelį į šalis, kad išsiimtų dangtelis ir adata.

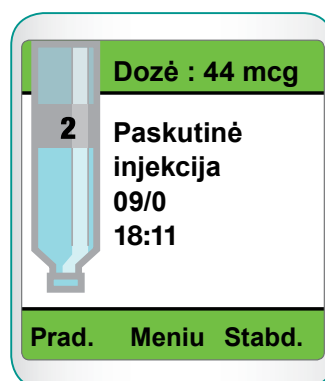

Saugiai išmeskite adatą į aštrių atliekų saugojimo talpyklą.


Išjunkite RebiSmart™ ir padėkite į saugojimo dėžutę.



# Tuščio užtaiso keitimas




Ištuštėjus užtaisiui, RebiSmart™ prietaise automatiškai pasirodys pranešimas „**Užtaisas tuščias. Pakeisti užtaisa**“.

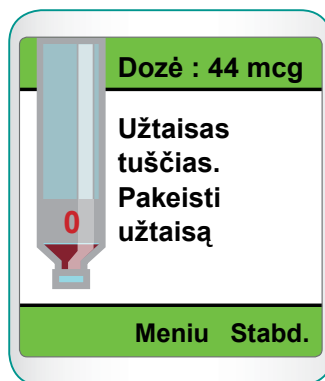

Atidarykite užtaiso įeigą, pastumdami užtaiso įeigos mygtuką aukštyn.



Išimkite tuščią užtaisa ir įdėkite naują užtaisa.

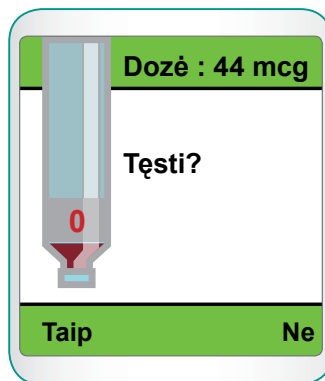


Uždarykite užtaiso įeigą. Jūsų RebiSmart™ prašo jūsų patvirtinti, kad norite tęsti.

Pasiruošęs, RebiSmart™ pypteli vieną kartą.




Pagrindiniame meniu pasirinkite „Išimti užtaisą“.

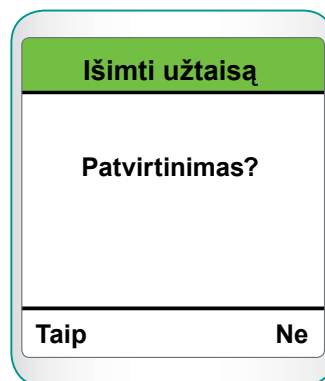

RebiSmart™ paprašys patvirtinti šį pasirinkimą.

Pasiruošęs, RebiSmart™ pypteli du kartus.

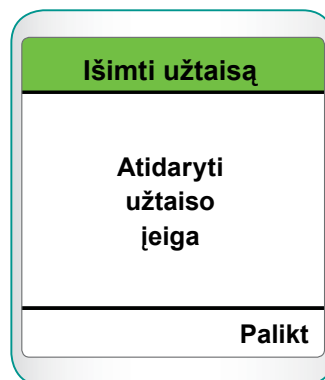

Prietaiso RebiSmart™ ekrane pasirodys pranešimas „Atidaryti užtaiso įeiga“.



Atidarykite užtaiso įeigą, pastumdami užtaiso įeigos mygtuką aukštyn ir išimkite užtaisą.

**Uždarę užtaiso įeigą, laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų. Pasirodžius įspėjimo pranešimui „Patikrinti užtaisą“, spragtelkite „OK“.**

- Prietaisas RebiSmart™ turi būti laikomas saugojimui skirtoje dėžutėje, net ir tada, kai jame yra Rebif® užtaisas.



## Rebif® saugojimas

---

- Rekomenduojama Rebif® daugiadozių užtaisų saugojimo temperatūra skirtinguose regionuose yra skirtinga. Apie atskirose šalyse taikomas taisykles skaitykite Rebif® daugiadozio užpildo etiketėje.
- Rebif® saugojimo temperatūra negali viršyti 25 °C. Jei gyvenate šilto klimato šalyje ar ten keliaujate, pasirūpinkite, kad RebiSmart™ (su Rebif® užpildu) visada būtų laikomas žemesnėje temperatūroje.
- Jei prietaisą RebiSmart™ (su Rebif® užtaisų) reikia laikyti šaldytuve, prietaisas normaliai veikia 2 °C arba aukštesnėje temperatūroje. Nelaikykite Rebif® šaldiklyje ar netoli jo. **Nešvirškite Rebif®, jei žinote arba įtariate, kad jis buvo užšaldytas.**

## Prieš kelionę

- Paskaičiuokite, kiek Rebif® jums reikės kelionės metu. Pasiimkite papildomą kiekį, jei kelionėje užtruktumėte ilgiau, nei planuojate.
- Nepamiškite įsidėti aštrių atliekų saugojimo talpyklą, keletą atsarginių adatų ir prietaisą RebiSmart™.
- Patikrinkite, ar paskirties vietoje bus šaldytuvai, kurį galėsite naudoti.  
**Saugojimo sąlygos taip pat gali būti skirtingos tiek jūsų šalies viduje, tiek kitose šalyse, dėl to reikia pasitarti su savo sveikatos priežiūros specialistu.**
- Jei prieš kelionę arba kelionės metu laikinai turite vartoti kitus vaistus, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą ir paklauskite, ar tai neturės įtakos Rebif® vartojimui.



## RebiSmart™ keliautojo krepšys

- RebiSmart™, Rebif® ir atsargas visada nešiokite keliautojo krepšyje.
- Prieš pradėdant kelionę šilto klimato šalyse (virš 25 °C), **ne mažiau kaip 12 valandų** prieš išvykimą keliautojo krepšį reikia palaikyti šaldytuve.
- Rebif® bus laikomas tinkamoje temperatūroje, jei užtaisas bus prietaiso viduje, saugojimui skirtoje dėžutėje, keliautojo krepšyje.
- Jei negavote RebiSmart™ keliautojo krepšio, kreipkitės Rebif® pagalbos linija arba į savo sveikatos priežiūros specialistą.



## Keliaujant lėktuvu

- RebiSmart™, Rebif® ir atsargas visada nešiokite kaip rankinį bagažą.
- Oro linijose arba aerouostuose, pro kuriuos keliausite, patikrinkite, ar nėra taikomi kokie nors ypatingi reikalavimai žmonėms, kurie turi injekcinių vaistų ir atitinkamų priedų.
- Jums gali prireikti sveikatos priežiūros specialisto pažymos, pavirtinančios, kad adatas ir papildomas atsargas jūs turite vežtis rankiniame bagaže.
- Prietaisą RebiSmart™ ir (arba) Rebif® galima skenuoti fotojuostai nekenkiančiais rentgeno aparatais.
- Nelaikykite prietaiso RebiSmart™ ar Rebif® atsargų orlaivio salono šaldytuve, nes jie gali atsitiktinai užšalti.
- Jei turite klausimų dėl keliavimo su Rebif®, aptarkite juos su savo sveikatos priežiūros specialistu.

**Neplanuojame, kad ši keliavimo informacija staiga pasikeis. Tačiau, siekdami apsidrausti, patariame prieš kelionę šias rekomendacijas aptarti su savo sveikatos priežiūros specialistu.**